

МЕДИЦИНСКИЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ЭКСТРЕННОЙ ПОМОЩИ



**ОСНАЩЕНИЕ ПРОМЫШЛЕННЫХ И
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ ПРИ
ОТСУТСТВИИ МЕДИЦИНСКОГО КАБИНЕТА
И МЕДИЦИНСКОГО ПЕРСОНАЛА**

2026



ООО «МЕДПЛАНТ» -

Российское предприятие, специализирующееся на разработке и производстве современного высокотехнологичного оборудования для оснащения машин скорой помощи, первой помощи и экстренной медицины. Наша продукция предназначена для спасения жизней и повышения эффективности оказания медицинской помощи в экстренных ситуациях.

Мы гарантируем надежность, инновационность и соответствие самым строгим стандартам качества, что позволяет нашим клиентам быть уверенными в каждом продукте.

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Статус резидента ОЭЗ «Технополис Москва»
- Инновации и импортозамещение
- Лидерство на рынке
- Широкий ассортимент и высокое качество
- География поставок и экспорт

НАБОРЫ, АПТЕЧКИ И УКЛАДКИ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

Комплект индивидуальный медицинский гражданской защиты КИМГЗ-"МЕДПЛАНТ" в подсумке «Волонтер-6» - приказ 1164н



Корпус сумки-чехла изготовлен из плотной синтетической ткани, устойчивой к обработке. Сумка-чехол имеет одно отделение, которое открывается-закрывается с помощью застежки «молнии», открывая свободный доступ к вложениям. Во внутренней части сумки-чехла «Волонтер-6» расположены: сетчатый карман по центру, а на крышке прозрачный карман и небольшие кармашки с эластичной резинкой для фиксации вложений. У сумки-чехла имеется световозвращающая полоса для лучшей заметности в темное время суток.

НАЗНАЧЕНИЕ:

Комплект индивидуальный медицинский гражданской защиты (КИМГЗ) составлен на основе ТУ 21.20.24-067-52777873-2023 и может применяться личными силами гражданской обороны, сотрудниками радиационно и ядерно опасных предприятий, а также гражданами лицами.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Комплект индивидуальный медицинский гражданской защиты (КИМГЗ) – это готовая аптечка для оказания первой помощи в чрезвычайных ситуациях: к примеру, в случае военных конфликтов, природных катаклизмов, техногенных катастроф. Также КИМГЗ поможет оказать доврачебную помощь в случае химического, радиационного и биологического поражения.

Аптечка для оказания первой помощи работникам в сумке-чехле «Волонтер-6» - приказ 262н



Аптечка поставляется в сумке-чехле «Волонтер-6» и представляет собой комплект изделий, позволяющий оказывать первую помощь.

Корпус сумки-чехла изготовлен из плотной синтетической ткани, устойчивой к обработке. Сумка-чехол имеет одно отделение, которое открывается и закрывается с помощью застежки-молнии, открывая свободный доступ к вложениям. Во внутренней части расположены: сетчатый карман по центру, прозрачный карман на крышке и небольшие кармашки с эластичной резинкой для фиксации вложений. Добавлена световозвращающая полоса для лучшей заметности в темное время суток.



НАЗНАЧЕНИЕ:

Предназначена для оказания первой помощи пострадавшему при несчастных случаях и состояниях, угрожающих жизни и здоровью.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Первая помощь.

Аптечка для оказания первой помощи «Универсальная» в сумке-чехле «Волонтер-6»



Сумка имеет специальную конструкцию, которая обеспечивает хранение, защиту и быстрый доступ к вложениям. Сумка изготовлена из плотной ткани. Корпус сумки закрывается на молнию. Для удобства переноски сумка оснащена ручкой. На лицевой стороне сумки размещен международный символ первой помощи и светоотражающий элемент, что облегчит поиск аптечки в условиях плохой видимости и любой экстренной ситуации.

Аптечка для оказания первой помощи представляет собой совокупность медицинских изделий, предназначенных для оказания первой помощи.

Аптечка не содержит лекарственных препаратов.

НАЗНАЧЕНИЕ:

Аптечка предназначена для оказания первой помощи до оказания медицинской помощи работникам на предприятиях всех сфер деятельности при несчастных случаях, дорожно-транспортных происшествиях, выполнении аварийно-спасательных работ и прочих состояниях, угрожающих жизни и здоровью.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Первая помощь.



УКЛАДКИ И НАБОРЫ МЕДИЦИНСКИЕ

Укладка для оказания первичной медико-санитарной помощи взрослым в неотложной форме УМСПв-НФ в футляре-саквояже УПМ-Пм/2



Укладки УМСПв-НФ предназначены для оказания первичной медико-санитарной помощи взрослой части населения в неотложной форме.

УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ:

Полевые условия, на дому, в лечебных и лечебно-профилактических медицинских учреждениях, передвижных комплексах, автомобилях медицинской помощи.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Службы скорой медицинской помощи, службы медицины катастроф, учреждения амбулаторной медицины, другие медицинские учреждения и службы.



ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ СЕРДЕЧНО-ЛЕГОЧНОЙ РЕАНИМАЦИИ

КОМПЛЕКТ ДЫХАТЕЛЬНЫЙ РУЧНОЙ, МНОГОРАЗОВЫЙ КД

НАЗНАЧЕНИЕ:

Предназначены для проведения искусственной вентиляции легких ручным способом в условиях дыхательной недостаточности любой этиологии.

ОПИСАНИЕ:

Каждый комплект включает в себя мешок дыхательный, эргономичные маски, резервный мешок и трубку для работы с кислородом.

Многоразовые дыхательные мешки изготовлены из силикона и отличаются высокой прочностью, надежностью и эластичностью. Эргономичные силиконовые маски высокого качества обеспечивают плотное прилегание к лицу. Допускают стерилизацию автоклавированием. Предохранительный клапан препятствует разрыву легких пациента. К впускному клапану через специальную трубку можно подавать кислород от кислородного баллона с редуктором или магистрали. Резервный мешок подключается также к впускному клапану и представляет собой буферную ёмкость для кислорода.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Службы скорой медицинской помощи, медицины катастроф, военной и экстремальной медицины; отделения анестезиологии, интенсивной терапии и реанимации стационаров; родильные дома и т.д.



КОМПЛЕКТ ДЫХАТЕЛЬНЫЙ РУЧНОЙ, ОДНОРАЗОВЫЙ КДО

НАЗНАЧЕНИЕ:

Предназначены для проведения искусственной вентиляции легких ручным способом в условиях дыхательной недостаточности любой этиологии.

ОПИСАНИЕ:

Каждый комплект включает в себя мешок дыхательный, эргономичные маски, резервный мешок и трубку для работы с кислородом. Одноразовые дыхательные мешки изготовлены из ПВХ. Одноразовое использование исключает риск перекрестного заражения. Нет необходимости в стерилизации и переупаковке. Одноразовые маски с надувным ободком обеспечивают плотное прилегание к лицу. Предохранительный клапан препятствует разрыву легких пациента. К впускному клапану через специальную трубку можно подавать кислород от кислородного баллона с редуктором или магистрали. Резервный мешок подключается также к впускному клапану и представляет собой буферную ёмкость для кислорода.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Службы скорой медицинской помощи, медицины катастроф, военной и экстремальной медицины; отделения анестезиологии, интенсивной терапии и реанимации стационаров; родильные дома и т.д.



МАСКА ДЛЯ СЕРДЕЧНО-ЛЕГОЧНОЙ РЕАНИМАЦИИ

СКЛАДНАЯ ОДНОРАЗОВАЯ



НАЗНАЧЕНИЕ:

Маска для сердечно-лёгочной реанимации (СЛР) предназначена для спасения жизни пострадавших с остановкой дыхания методом проведения искусственного дыхания «рот-рот» спасателем или медицинским работником с максимальной защитой его от заражения.

ОПИСАНИЕ:

Применяется при проведении реанимационных мероприятий взрослым и детям ростом более 120 см.

Маска оснащена регулируемым эластичным ремнем, фиксирующим ее на голове пострадавшего. В нижней части маски имеется порт для подключения кислородной трубки. Мягкая манжета обеспечивает плотное прилегание, а однонаправленный клапан с фильтром – надежную защиту.

В комплекте с маской поставляется прочный компактный кейс-футляр для удобного хранения и транспортировки.

Позволяет обеспечить немедленную респираторную поддержку и защиту лица, оказывающего помощь, без снижения эффективности сердечно-легочной реанимации.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Маска СЛР предназначена для применения в любом месте, где произошла остановка дыхания пострадавшего (на улице, дома, в транспорте, на работе, в медицинском учреждении).



ИНДИКАТОР ЭФФЕКТИВНОСТИ СЕРДЕЧНО-ЛЁГОЧНОЙ РЕАНИМАЦИИ «ТЕМП»

НАЗНАЧЕНИЕ:

Представляет собой устройство, предназначенное для помощи выполнения непрямого массажа сердца при проведении сердечно-легочной реанимации.

ОПИСАНИЕ:

Индикатор СЛР напрямую измеряет ускорение посредством встроенного акселерометра и рассчитывает перемещение вдоль вертикальной оси. Сердечно-легочная реанимация – это комплекс мероприятий, направленных на восстановление кровообращения и/или дыхания у больного или пострадавшего в случае наступления клинической смерти. СЛР включает в себя не прямой массаж сердца и искусственную вентиляцию легких (ИВЛ). Правильно выполняемая СЛР поддерживает достаточный уровень кровообращения и газообмена для предотвращения повреждения головного мозга, возможности восстановления сердечной деятельности и самостоятельного дыхания. Мероприятия СЛР предполагается проводить до появления самостоятельного дыхания и эффективной сердечной деятельности или не менее 30 мин.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

В клиниках, в транспортных средствах скорой медицинской помощи, при оказании первой помощи, в учебных центрах.



ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКИЕ ИММОБИЛИЗАЦИОННЫЕ ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ ПАЦИЕНТОВ

НОСИЛКИ ТЕНТОВЫЕ С СИНТЕТИЧЕСКИМ ПОКРЫТИЕМ БЕСКАРКАСНЫЕ

НАЗНАЧЕНИЕ:

Носилки бескаркасные предназначены для транспортировки пациента при работе в тесном помещении и ограниченном пространстве - там, где по габаритам не входят обычные "жесткие" носилки.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Службы скорой медицинской помощи, медицины катастроф, ГО и ЧС, военной и экстремальной медицины; мобильные спасательные формирования.



носилки «Плащ»,
модель 1



носилки «Плащ»,
модель 1У



носилки «Плащ»,
модель 2



носилки «Плащ»
модель 4



носилки «Плащ»
модель 5

НОСИЛКИ «ВОЛОКУШИ»

НАЗНАЧЕНИЕ:

Носилки «Волокуши» (эвакуационные сани) представляют собой гибкие носилки, которые используются для эвакуации неспособных к самостоятельному передвижению пострадавших в условиях военных действий или при других экстренных ситуациях.

ОПИСАНИЕ:

Носилки «Волокуши» (эвакуационные сани) предназначены для безопасной и надёжной эвакуации раненых или неспособных к самостоятельному передвижению пациентов. Подходят только для горизонтальной эвакуации. Носилки, сделанные из гибкого материала (полиэтилен низкого давления), который позволяет им хорошо скользить практически по любой поверхности, что облегчает процесс эвакуации для спасателя и делает его более комфортным для пациента. Система фиксирующих ремней обеспечивает надёжную стабилизацию пациента и защищает его во время транспортирования. Носилки «Волокуши» - это простое в использовании малогабаритное средство для безопасной и быстрой эвакуации.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Службы скорой помощи, медицины катастроф, военной и экстремальной медицины, медпункты и здравпункты предприятий.



модель №1
стандартные



модель №2
компактные

ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ИММОБИЛИЗАЦИИ И МЕДИЦИНСКОЙ ЭВАКУАЦИИ

КОМПЛЕКТЫ ШИН ТРАНСПОРТНЫХ ИММОБИЛИЗАЦИОННЫХ СКЛАДНЫХ

КШТЛ-«МЕДПЛАНТ»



НАЗНАЧЕНИЕ:

Комплект шин транспортных лестничных предназначен для иммобилизации верхних и нижних конечностей в процессе медицинской эвакуации.

ОПИСАНИЕ:

Комплект шин транспортных лестничных КШТЛ-МП-01 состоит из шины для руки и шины для ноги, выполненных из стального проволочного лестничного каркаса, облицованного вспененным полиэтиленом (НПЭ) и обшитого прочной тканью ПВХ.

В отличие от классических лестничных шин, КШТЛ-МП-01 не требуют дополнительной подготовки к работе. Все что нужно – согнуть шину в необходимом месте, смоделировать по конечности и зафиксировать бинтами.

Данные шины идеально подходят не только для иммобилизации травмы верхних и нижних конечностей, но и для иммобилизации плечевого перелома.

Отсутствие труднодезинфицируемых фиксирующих элементов в виде «липучек» позволяют шинам прослужить вам долгую и надежную службу. Комплект шин поставляется в удобном тканевом чехле на кулиске и с ручкой для переноски.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Травматология, службы скорой медицинской помощи, медицины катастроф, военной и экстремальной медицины, учреждения здравоохранения, медпункты, здравпункты предприятий.



КОМПЛЕКТЫ ШИН ТРАНСПОРТНЫХ ИММОБИЛИЗАЦИОННЫХ СКЛАДНЫХ МНОГОКРАТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ КШТИ-01-«МЕДПЛАНТ»

ПЕРВЫЕ В РФ
МНОГОРАЗМЕРНЫЕ
СКЛАДНЫЕ ШИНЫ



НАЗНАЧЕНИЕ:

Пластиковые складные многоразовые шины для иммобилизации верхних и нижних конечностей предназначены для догоспитальной транспортировки пациентов.

ОПИСАНИЕ:

Шины представляют собой пластиковые пластины специальной формы с продольной и поперечной перфорацией для легкого моделирования любого размера шины по длине и полноте конечности. Крепление шин производится с помощью бинтов или специальных ремней.

Шина-воротник представляет собой конструкцию, регулируемую как по объему шеи, так и по высоте. Фиксация воротников осуществляется с помощью текстильной застежки.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Травматология, службы скорой медицинской помощи, медицины катастроф, военной и экстремальной медицины, учреждения здравоохранения, медпункты, здравпункты предприятий.

КОСЫНОЧНЫЕ ПОВЯЗКИ

Предназначены для иммобилизации пострадавших с травмами верхних конечностей на всех этапах оказания доврачебной и медицинской помощи, включая транспортирование и медицинскую эвакуацию.

Повязки ПКв-01 могут быть использованы для фиксации шин или для фиксации руки при переломах, ушибах и растяжениях. Повязки выполнены из синтетической водоотталкивающей ткани ПВХ в виде сумки - «конверта» с плечевым ремнем, регулируемым под разный рост пациента. Регулировка ремня по высоте происходит с помощью специальной пряжки, которая закрепляет повязку в нужном положении.

Универсальная косыночная повязка (ПКу-01) выполнена из хлопчатобумажной ткани. Регулировка по высоте выполняется с помощью завязывания концов на необходимом уровне.

Повязка косыночная является изделием многократного применения.



ПКв-01



ПКу-01



ПКу-01

ПОЯС ИММОБИЛИЗАЦИОННЫЙ ДЛЯ СТАБИЛИЗАЦИИ ТАЗА

ПСТ - «МЕДПЛАНТ»

НАЗНАЧЕНИЕ:

Пояс предназначен для иммобилизации и стабилизации костей таза при нестабильных переломах и разрывах связок.

ОПИСАНИЕ:

Пояс иммобилизационный представляет собой конструкцию, состоящую из основания, ремня и петли для утягивания.

МНОГОРАЗОВЫЙ: основание выполнено из натурального х/б материала и неопрена. Ремень и петля выполнены из стропы. На ремне располагается цветовая периодическая шкала, позволяющая при наложении обеспечивать дозированную компрессию за счет перемещения ремня через пряжку на величину, равную периоду шкалы.

Петля пояса предназначена для силового упора при фиксации больного. Окончательная фиксация выполнена в виде застёжки типа «Велькро». Пояс выпускается трех размеров.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Травматология, службы скорой медицинской помощи, медицины катастроф, военной и экстремальной медицины, учреждения здравоохранения, здравпункты.



ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ СЛУЖБ БЕЗОПАСНОСТИ

ТУРНИКЕТНЫЙ ЖГУТ ЖК-03-МЕДПЛАНТ

ПЕРВЫЙ РОССИЙСКИЙ
ТУРНИКЕТ ДЛЯ ОСТАНОВКИ
АРТЕРИАЛЬНЫХ
КРОВОТЕЧЕНИЙ КОНЕЧНОСТЕЙ

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:

- Комбинированная 2х-щелевая пряжка с зубцами для лучшей фиксации
- Встроенный эластичный элемент в ленту для дополнительной компрессии при преднатяге
- Две стропы при вращении воротка наматываются на катушку, стягивая ленту, исключая возможность задевания за одежду
- Плоскость размещения катушки и воротка вдоль плоскости ленты
- Основание турникета выполнено в виде ложементта для катушки

ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ВРЕМЕННОЙ ОСТАНОВКИ КРОВОТЕЧЕНИЙ ПРИ
ПОВРЕЖДЕНИИ АРТЕРИАЛЬНЫХ СОСУДОВ НИЖНИХ И ВЕРХНИХ
КОНЕЧНОСТЕЙ



Патенты ФИПС: 2531449 от 25.09.2014, ФИПС: 2780136 от 19.09.2022 и ЕАПО: 025206 от 30.11.2016

ТУРНИКЕТНЫЙ ЖГУТ ЖК-02-МЕДПЛАНТ

ПЕРВЫЙ РОССИЙСКИЙ
ТУРНИКЕТ для ОСТАНОВКИ
АРТЕРИАЛЬНЫХ
КРОВОТЕЧЕНИЙ КОНЕЧНОСТЕЙ

ПРЕДНАЗНАЧЕН для ВРЕМЕННОЙ ОСТАНОВКИ КРОВОТЕЧЕНИЙ ПРИ
ПОВРЕЖДЕНИИ АРТЕРИАЛЬНЫХ СОСУДОВ НИЖНИХ И ВЕРХНИХ
КОНЕЧНОСТЕЙ

* ЕДИНСТВЕННЫЙ ТУРНИКЕТ НА РЫНКЕ С:

- САМОФИКСАЦИЕЙ ВОРОТКА НА КОНЕЧНОСТИ;
- ОТСУТСТВИЕМ СКОБЫ для ФИКСАЦИИ ВОРОТКА;
- ДОЗИРОВАННЫМ ШАГОМ КОМПРЕССИИ;
- ЭФФЕКТИВНЫМ ПРОВЕДЕНИЕМ ПРОЦЕДУРЫ
«КОНТРОЛЬ ЖГУТА».

Конструктивно отличается наличием катушки с двумя стропами,
которую закручивает вороток.

Время закрутки сравнимо с классическими аналогами, если
выполняется обученным бойцом.



Патенты ФИПС: 2531449 от 25.09.2014, ФИПС: 2780136 от 19.09.2022 и ЕАПО: 025206 от 30.11.2016

НОЖНИЦЫ ДЛЯ РАЗРЕЗАНИЯ ПОВЯЗОК



НАЗНАЧЕНИЕ:

Тактические ножницы позволяют безопасно разрезать тонкие гипсовые повязки, бинты, элементы одежды, пластиковые и картонные шины, шины с дюралюминиевым покрытием, ремни и т.п. из различных текстильных и полимерных материалов.

УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ:

Ножницы для разрезания повязок (тактические ножницы) применяются в приемных отделениях медицинских организаций, травматологических отделениях медицинских организаций, медицина катастроф, службы скорой медицинской помощи, службы спасения



АПТЕЧКА ДЛЯ ОКАЗАНИЯ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ РАБОТНИКАМИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ОХРАНЫ (ИНДИВИДУАЛЬНАЯ) АППИво-«МЕДПЛАНТ»



НАЗНАЧЕНИЕ:

Предназначена для оказания первой помощи пострадавшему при несчастных случаях и состояниях, угрожающих жизни и здоровью.

УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ:

На производстве, транспорте, в учреждениях, общественных местах, местах скопления людей, домашних условиях, условиях боевого столкновения, на открытой местности и т. п.

ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ:

Аптечка представляет собой комплект изделий, позволяющий оказывать первую помощь, который поставляется в подсумке «Волонтер-7».

Подсумок изготовлен из синтетической водоотталкивающей ткани. Имеется ручка для быстрого открывания, а также съемная панель с системой крепления типа молле. Во внутренней части подсумка расположены эластичные крепления и карманы.

Аптечка для оказания первой помощи (индивидуальная)

АППИ-«МЕДПЛАНТ»



НАЗНАЧЕНИЕ:

Предназначены для оказания первой помощи пострадавшему при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и/или техногенного характера.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Воинские формирования федерального органа исполнительной власти, аварийно-спасательные формирования и спасательные службы, а также создаваемые на военное время в целях решения задач в области обороны специальные формирования.

ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ:

Представляет собой комплект изделий медицинского назначения, позволяющий оказывать первую помощь. Аптечка выпускается в подсумке «Волонтер-7».

Подсумок «Волонтер-7». Изготовлен из синтетической водоотталкивающей ткани. На подсумке предусмотрена ручка для «быстрого открытия», а также съемная панель с системой крепления типа «MOLLE». Во внутренней части подсумка, расположены эластичные крепления и карманы.





РЕЗИДЕНТ 
ОЗЗ «ТЕХНОПОЛИС МОСКВА»



медплант

Москва, Волгоградский пр-т 42, корп.5, Технополис «Москва»,

Тел.: +7 (495) 223 66 38, +7 (495) 223-60-16

www.medplant.ru

medplant@medplant.ru

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!